

Rutin för användning av personlig skyddsutrustning Tiki mask

(benämns "skyddsmask")



Tikimasken erbjuder skydd mot droppsmitta och aerosolsmitta. Utrustningen går att desinficera och är konstruerad för återanvändning efter genomförd desinfektion.

Skyddsmasken består av själva masken samt en separat fläkt- och batterienhet som kopplas till ett HEPA-filter. Fläkten har variabelt flöde som skapar ett positivt tryck i själva masken och på så sätt hindrar smittämnen från att komma in i masken vilket ger ett bra skydd även om risk finns för aerosolsmitta. En instruktionsfilm för masken finns här: <https://www.youtube.com/watch?v=Cn73SrbwYtw&feature=youtu.be>

Innan masken tas i bruk första gången:

Ladda batteriet med den medföljande laddaren.

1. Sätt i laddaren i vägguttag.
2. Koppla in laddkabeln till fläkt/batteri
3. Kontrollera att röd lampa lyser på laddaren, det indikerar att laddning pågår.
4. När denna lampa lyser grönt är batteriet fulladdat.

På grund av att laddaren har hög effekt är det viktigt att laddning alltid sker övervakad, om fläkt/batterienhet blir väldigt varm avbryt laddningen och den fläkt/batterienheten läggs åt sidan för reklamation. Laddtiden är i regel ca 30 min för full laddning.

Masken sätts ihop enligt instruktion. Viss försiktighet när filtret sätts ihop med fläktenheten så att masken inte skadas.

Nollställ fläktenheten

Tryck in ljusknappen och sedan på/av knappen, håll båda knapparna intryckta till de två högra ljusdioderna tänds och den högra har blinkat. Fläkten ska inte gå igång. När den högra har blinkat är fläkten nollställd och kan börja användas.

Prova ut att masken passar

1. Sätt masken framför ansiktet och säkerställ att inget hår eller liknande kläms av gummikanten.
2. Täck hålen ovanpå masken och andas in, du ska känna att masken "klistras" mot ansiktet. Det visar att den sluter tätt. Om du inte får masken tät säkerställ var läckaget sker och justera placeringen av masken eller byt storlek.

Montera masken

1. Sätt fast spännbanden runt om masken.
2. För in batteri/fläktenheten i avsedd del av masken, knapparna ska vara nedåt ansiktet.
3. Sätt fast filtret genom att placera det i 30 graders vinkel och försiktigt skruva fast det mot batteri/fläktenheten.

Ta på masken

1. Säkerställ att masken är hel och inte synligt kontaminerad. Om den är defekt ska den inte användas. Vid synlig kontamination genomförs rengöring med ytdesinfektion.
2. Spänn på masken, justera remmarna vid behov för att få en bra passform. Vid hakan kan masken ibland trycka och det finns en skumgummikudde att fästa på insidan vilket kan hjälpa. Fläkten startas genom att trycka in på/av knappen i 3s. Fläkten kommer anpassa varvtalet för att säkerställa positivt tryck i masken.

Under användning

Masken ger ett skydd både mot droppsmitta och aerosolsmitta.

Indikatorlampor

Den vänstra röda lampan lyser så länge fläkten är igång. När den högra lampan blinkar och fläkten avger ett ljudlarm är batterinivån låg, ca 15 min drifttid återstår. Det är då lämpligt lämna vårdrummet, ta av skyddsutrustningen på ett säkert sätt och sätta batteriet på laddning.

När båda lamporna till höger börjar blinka och fläkten avger ett ljudlarm är filtret antingen blockerat eller en större läcka in i masken vilket ger ett negativt tryck. Du kan då kontrollera om det finns något som blockerar fläkten alternativt identifiera var läckage finns. Om läckage sker när du arbetar med patient där det finns risk för aerosolbildning kan exponering ha skett och bör hanteras enligt särskild rutin.



Rutin för avklädning av personlig skyddsutrustning Tiki mask

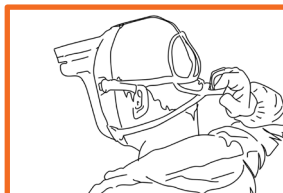
(benämns "skyddsmask")



Ta av handskarna och desinficera händerna.



Ta av skyddsförklädet och desinficera händerna.




Ta av skyddsmasken. Placera masken på en...




avställningsyta för desinfektion. Desinficera händerna.



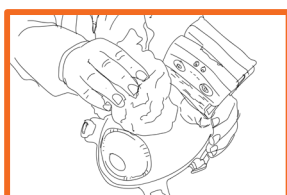
Sätt på nytt förkläde. Börja med att lösgöra filterdelen.



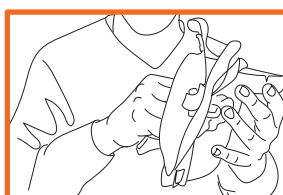Torka maskens utsida, därefter tätninglistens utsida.



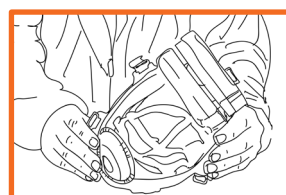Byt torktrasa och torka insidan av masken med ytdesinfektion.



Låt torka i väntan på nästa användning.

Avklädningsrutin

1. Ta av handskarna
2. Desinficera händerna
3. Ta av skyddsförklädet
4. Desinficera händerna
5. Ta av skyddsmasken genom att fatta tag i spännbandets ögla och dra ut och över huvudet. Undvik att röra vid ansiktet och framsidan av masken.
6. Placera masken på en avställningsyta i väntan på desinfektion.
7. Desinficera händerna.

Desinfektion av skyddsmasken

Desinficera händerna, ta därefter på ett plastförkläde.

Rengör skyddsmasken noggrant med en trasa eller liknande som är väl indränkt i ytdesinfektion. Tänk på att vara noggrann med de lite mer svåråtkomliga delarna såsom spännen.

Undvik att blöta ned insidan av filtret och fläktdelen med ytdesinfektion. Torka av ytan men undvik att "dränka in" dessa delar med ytdesinfektion. Risk finns då för försämrad filtereffekt eller att fläkten slutar fungera.

1. Lösgör filterdelen för att komma åt ordentligt.
2. Börja med utsidan av den skålformade delen av masken. Därefter utsidan av tätninglistens.
3. Fortsätt därefter med de elastiska banden.
4. Byt torktrasa och torka noggrant av insidan av masken med ytdesinfektion.
5. Låt torka i väntan på nästa användning.

Allmänna råd kring användning

Utse en eller flera personer som tar ansvar för att mer ingående lära sig skyddsutrustningens funktion och som sedan kan fungera som experter på den egna enheten samt ta ansvar för övergripande kontrollera att maskerna fungerar och byta ut defekta masker.

Viktigt att vara medveten om att den laddare som levererats med maskerna har hög effekt. Batterierna och laddaren är kontrollerad av leverantören men av försiktighetsskäl ska all laddning av batterierna ske så att det tidigt går att upptäcka om något batteri blir för varmt. Noteras något sådant ska batteriet inte användas mer och återkoppling ske till tillverkaren för byte.

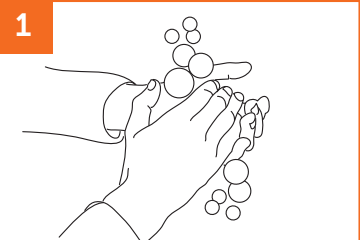
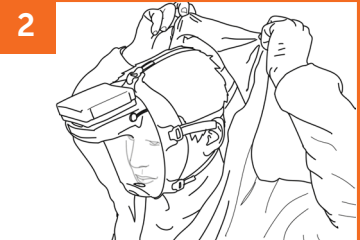

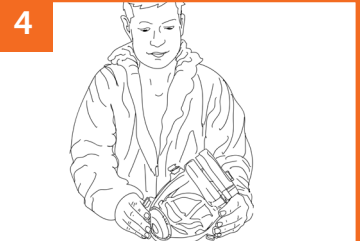





Beroende på arbetssituationen på den enhet som använder skyddsmaskerna kan en lokal rutin behöva utarbetas kring laddning av batterier samt desinfektion av maskerna. Vid stor användning kan det vara bra att ha en avdelad person som sköter detta, alternativet är att varje användare tar ansvar för "sin mask" löpande under arbetspasset.

Varje medarbetare använder en "egen mask" under sitt arbetspass.



Rutin för avklädning av personlig skyddsutrustning Tiki mask

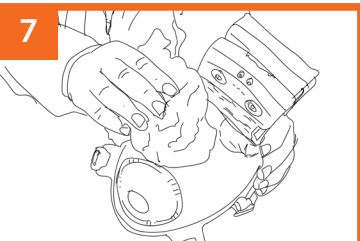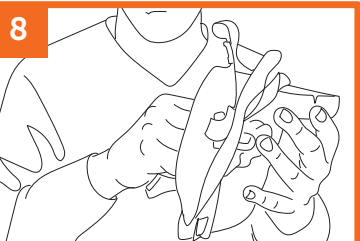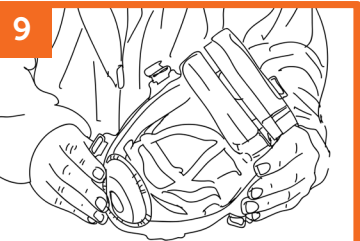(benämns "skyddsmask")

<p>1</p>  <p>Ta av handskarna och desinficera händerna.</p>	<p>2</p>  <p>Ta av skyddsförklädet och desinficera händerna.</p>	<p>3</p>  <p>Ta av skyddsmasken. Placera masken på en...</p>
<p>4</p>  <p>avställningsyta för desinfektion. Desinficera händerna.</p>	<p>5</p>  <p>Sätt på nytt förkläde.</p>	<p>6</p>  <p>Börja med att lösgöra filterdelen.</p>
<p>7</p>  <p>Torka maskens utsida, därefter tätningslistens utsida.</p>	<p>8</p>  <p>Byt torktrasa och torka insidan med ytdesinfektion.</p>	<p>9</p>  <p>Låt torka i väntan på nästa användning.</p>

Avklädningsrutin

1. Ta av handskarna
2. Desinficera händerna
3. Ta av skyddsföreklädet
4. Desinficera händerna
5. Ta av skyddsmasken genom att fatta tag i spännbandets ögla och dra ut och över huvudet" Undvik att röra vid ansiktet och framsidan av masken.
6. Placera masken på en avställningsyta i väntan på desinfektion.
7. Desinficera händerna.

Desinfektion av skyddsmasken

Desinficera händerna, ta därefter på ett plastförkläde.

Rengör skyddsmasken noggrant med en trasa eller liknande som är väl indränkt i ytdesinfektion. Tänk på att vara noggrann med de lite mer svåråtkomliga delarna såsom spännen.

Undvik att blöta ned insidan av filtret och fläktdelen med ytdesinfektion. Torka av ytan men undvik att "dränka in" dessa delar med ytdesinfektion. Risk finns då för försämrad filtereffekt eller att fläkten slutar fungera.

1. Lösgör filterdelen för att komma åt ordentligt.
2. Börja med utsidan av den skålformade delen av masken. Därefter utsidan av tätningslistan.
3. Fortsätt därefter med de elastiska banden.
4. Byt torktrasa och torka noggrant av insidan av masken med ytdesinfektion.
5. Låt torka i väntan på nästa användning.